

BEHANDELING VAN EEN SKINTEAR MET FLAMINAL[®] HYDRO



Rivash Sewnundun, wijkverpleegkundige
Cardia Woonzorgcentrum Tabitha, Den Haag, Nederland

Voorgeschiedenis en behandeling

Informatie en ziektegeschiedenis:

Mw W (1935): Bekend met dementie, COPD, CVA (1997), chronische nierinsufficiëntie, hypertensie, claudicatio intermittens (arterieel vaatlijden)

Mw is aangemeld via de huisarts voor opstarten wondzorg. Mevrouw heeft een skintear op het rechteronderbeen, welke al twee weken oud is (25 maart 2022) ten gevolge van een valincident. Genezingsproces lijkt traag te verlopen. Wellicht tgv een slechte circulatie door het vele roken (15 sigaretten per dag) en door het gebruiken van geen geschikt wondmateriaal door haar dochter (mantelzorger). Omwille van een wankel evenwicht maakt mevrouw gebruik van een rollator binnenshuis.

Dag 1: 20-04-2022: wondbeleid

Spoelen onder douche, schoonmaken en droogdeppen met gaas
Flaminal® Hydro aanbrengen (0,5 cm)
Afdekken met Cuticell, absorberend verband
Fixeren met een windel
Frequentie: 3x per week

22-04-2022 (dag 3): beleid vervolgen



Dag 1: start Flaminal® Hydro

T : 90% geel, 10% rood (3x5cm)/huidflap breuk

I : Lokaal en gevoelig

M : Vochtig

E : Glad & intact



Dag 3 : vervolg Flaminal® Hydro

T : 80% geel, 20% rood (3x5cm), huidflap deels donker

I : Lokaal en gevoelig

M : Vochtig

E : Glad & intact



Vervolgbehandeling en resultaat

29-04-2022 (dag 9)

Wondbeleid vervolgen: Flaminal Hydro, Cuticell, absorberend verband en windel.

06-05-2022: (dag 16)

Minimaal exsudaat op oud verband.
Na schoonmaken nog wat geel beslag weg kunnen krijgen. Nieuw granulatieweefsel zichtbaar.



Dag 9: Wondbeleid vervolgen

T : 10% geel, 90% rood (3x4cm)

I : Gevoelig

M : Vochtig

E : Intact, droog



Dag 16: Nieuw granulatieweefsel

T : 20% geel, 80% rood

I : -

M : Matig

E : Sluitend, intact

Dag 14:

 Flaminal®



Vervolgbehandeling en resultaat

13-05-2022 (dag 23)

Nog 2 kleine plekjes waarop Flaminal® Hydro werd aangebracht, afgedekt met Cuticell.

18-05-2022 (dag 28)

Wond gesloten. Preventief werd er Mepilex Border aangebracht.

Conclusie:

Inzet van Flaminal® zorgde voor een pijnvrije behandeling en een effectieve en snelle wondgenezing.



Dag 23: Nog 2 kleine plekjes

T : 100% rood, 2 kleine plekjes

I : -

M : Droog

E : Sluitend



Dag 28: Wond gesloten

T : -

I : -

M : -

E : -

